

# Nonin 7500FO

száloptikás MR kompatibilis pulzoximéter



A Nonin Medical 7500FO (**száloptikás**) asztali pulzoximéterét kifejezetten telepített, vagy mozgó MR létesítményekben alkalmazzák a **csecsemő-, gyermek- és felnőtt betegek** megfigyelésére. Az egyszerű lábujj vagy ujj érzékelő alkalmazásával a 7500FO kompakt kialakítása, egyszerű funkcionalitása, legalább **30 órás üzemidő**, **4 órás gyors feltöltés** és legalább **70 órás memória** teszi lehetővé MR használatkor való megfelelő alkalmazását.

# Avant 7500 FO modell

- **MR kompatibilis:** 3.0 tesla
- **Kényelmes, könnyű és tartós**
- **Könnyű használat:** Nagy, világos képernyő könnyű átláthatóságot biztosít
- **Nagy kapacitású memória:** 70 órán túli memória a paraméterek rögzítéséhez
- **Sokoldalú** – használható újszülött, gyermek és felnőtt betegek intézeti és otthoni ellátásában
- **Flexibilis** – Önálló eszközként és egyéb eszközökkel együtt is alkalmazható
- **PureSAT®** pulzoximetriás technológia

## Felhasználóbarát felület

Az Avant 7500 kijelző megfelelően biztosítja a biztonságos megfigyelés lehetőségét.



**Pulzus erősség mérése oszlopos kijelzőn** – Minden pulzusütés által kiváltott jel és a hangmagasság a pulzuserősség mértékét jelzi.



**Pulzusminőségi mutató** - Észleli a beteg mozgását, vagy a jel minőségének változását.



**Érzékelő hibajelzője** - Jelzi, ha az érzékelő levált, rosszul illeszkedik, meghibásodott vagy nem kompatibilis a monitorral.

A beteg pulzoximetriás méréseinek gyors és teljes körű felmérését megkönnyíti az pulzuserősségi oszlopdiaagram, a változó pulzus / szaturáció hang és a pulzusminőségi mutató által szolgáltatott információk kombinációja.

## NONIN 7500FO MEMÓRIA:

A Nonin 7500 sorozatú oximéter akár 70 órányi oxigén- és pulzusadatot is képes rögzíteni.

Az adatok megtekintéséhez / nyomtatásához Windows alapú számítógépen adatkábel (NONIN 7500SC) és az nVISION vagy Profox szoftverre van szükség.

## NONIN 7500FO RIASZTÁS:

Rugalmas és sokoldalú riasztási beállítások.

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy a riasztási határértéket és a hangerő alapértelmezett beállításait a saját igényeire igazítsa.

Betegbiztonsági mód zárolja a riasztási

## OPCIÓK:

- Száloptikai érzékelők
- PureLight® felnőtt / gyermek száloptikás érzékelő 20 vagy 30 "szenzor kábellel
- PureLight® Infant / Gyermek száloptikás érzékelő 20 vagy 30 "szenzor kábellel
- Hordtáska
- Pole Mount rendszer
- Adatkezelő szoftver, kompatibilis az nVISION® adatszoftverrel
- Kimeneti opciók

Authorized Distributor:

H.S.-MEDPLAN Kft.  
1222 Budapest  
Nagytétényi út 30.  
Telefon: +36 1 3610136, +36 1 3610272  
FAX: +36 1 3651186  
e-mail: medga@medplan.hu  
www.medplan.hu

©2013 Nonin Medical, Inc. All trademarks are the property of Nonin Medical, Inc. unless otherwise noted.  
P/N 9648-001-01

Nonin Medical, Inc.

13700 1st Avenue North  
Plymouth, MN • 55441-5443 • U.S.A.

Tel: +1.763.553.9968 1.800.356.8874

Fax: +1.763.577.5521

E-mail: info@nonin.com

nonin.com



Nonin Medical B.V.

Prins Hendriklaan 26  
1075 BD Amsterdam • Netherlands

Tel: +31 (0)13-79 99 040

Fax: +31 (0)13-79 99 042

E-mail: infointl@nonin.com

