

EOVE-150

Lélegeztető gép



MOVE AND CARE CONCEPT BY

EOVE

Air Liquide Healthcare

A sebezhető életek védelme

Minden krónikus betegségben szenvedő betegnek folyamatos, személyre szabott támogatásra van szüksége. Air Liquide Healthcare a következőkre fejleszt megoldásokat:



Döntéshozatal megkönnyítése a kórházakban és a pulmonológiai osztályokon a diagnózis és az új kezelések felállítása érdekében.



Olyan kezeléseket biztosítson, amelyek kényelmesek, hatékonyak és alkalmasak a betegek otthonába.



Az egészségügyi szolgáltatók és az orvosi csapatok közötti interakció megkönnyítése a veszélyeztetett betegek azonosítása, az események előrejelzése, mielőtt azok megtörténnének, és a figyelem a legnagyobb szükségben szenvedőkre összpontosítva.

EOVE-150

Komplett megoldás



Minden megoldáshoz megfelelő kezelés:

- ▶ Gyermek betegek számára 3,5 kg-tól, 30 ml légzési térfogattal
- ▶ Lélegeztetés igény szerint: térfogat vagy nyomás
- ▶ Komplett légzőkör választék: szelepekkel, szivárgással, egyszerű szárral, dupla ággal vagy csutorával
- ▶ Nagy áramlású üzemmód, amellyel helyet takaríthat meg a páciens otthonában
- ▶ Csutora mód a jobb legjobb életminőség érdekében



Szabadság és mobilitás:

- ▶ Click&Go koncepció, amely 1,8 kg-os cserélhető lélegeztető modulon alapul
- ▶ Mobilitási megoldások táskával a modulhoz és külső akkumulátorokhoz
- ▶ Akár 18 órás autonómia külső akkumulátorral



Modularitás és intuitivitás:

- ▶ Beállítások és megfigyelési nézet ugyanazon a képernyőn
- ▶ Skálázható interfészek
- ▶ Könnyen konfigurálható
- ▶ Akár 4 átnevezhető és testreszabható előbeállítás





Hamarosan



Csatlakozás 4G-n vagy USB-kulcson keresztül:

- ▶ Lélegeztetési adatok: Részletes adatok letöltése és elemzése statisztikákkal, hullámformákkal és trendgrafikákkal
- ▶ Karbantartási adatok helyreállítása valós időben



Monitoring megoldások



Transzkután CO2 monitorozás a Sentec segítségével



SpO2 monitorozás Xpodon vagy BT-n keresztül



FiO2 figyelőkészlet (csak kábel)

3,5 kg-tól
30 mL-től

Könnyű
használat

Moduláris
interfészek

Távoli
felügyelet
4G-n keresztül

Franciaországban
tervezve és gyártva

Szabadság
és mobilitás

C-Flow
mód

 **PASS**
FRENCH TECH

Beállítások

Valve modes (A)VCV - (A)PCV - PSV - PSV-VT - V-SIMV - P-SIMV		
Settings	Adult	Pediatric
VT (ml)	300 - 2500	30 - 600
PEEP (mbar)	OFF / 1 - 25	OFF / 1 - 20
Flow ramp	Square / Decelerating	Square / Decelerating
Rate (c/min)	5 - 60	8 - 80
I. Time (sec)	0,3 - 2,5	0,3 - 2,5
I. Trig	OFF / AUTO / 1 - 5	OFF / AUTO / 1 - 5
E. Trig (%)	AUTO / 10 - 90	AUTO / 10 - 90
Pres. Control (mbar)	5 - 59	5 - 59
Pres. Support (mbar)	5 - 59	5 - 59
Pres. Ramp	1 - 5 (100 - 500 ms)	1 - 5 (50 - 250 ms)
I. Time Min (sec)	AUTO / 0,3 - 2,5	AUTO / 0,3 - 2,5
I. Time Max (sec)	AUTO / 0,3 - 2,5	AUTO / 0,3 - 2,5

Mouthpiece modes MPV - MPP		
Settings	Adult	Pediatric
VT (ml)	300 - 2500	100 - 600
Flow ramp	Square/Decelerating	Square/Decelerating
Rate (cpm)	OFF / 5 - 60	OFF / 5 - 80
I. Time (sec)	0,3 - 2,5	0,3 - 2,5
I. Trig	OFF / AUTO / 1 - 5	OFF / AUTO / 1 - 5
Blas Flow (L/min)	1 - 20	1 - 20
Pres. Control (mbar)	5 - 59	5 - 59
Clinical		
Indications	Life support / >3,5 kg	
Circuits types	Simple / Double limb	
Presets	1 to 4 customizable presets	
Physical		
	Docking	Module
Weight	1,3 kg	1,8 kg
Dimension	25 x 21 x 13 cm	24,5 x 14,5 x 10 cm
Supply		
Power supply	220-240 VAC	
Internal battery	Lithium Ion 2.8 Ah	4 hours
External DC Input	13 - 30 V	115 W

Leak Modes CPAP - PAC - ST - VTS - C-FLOW		
Settings	Adult	Pediatric
VT (ml)	300 - 2500	30 - 600
CPAP (mbar)	4 - 20	4 - 20
IPAP (mbar)	6 - 50	6 - 50
EPEP (mbar)	4 - 25	4 - 25
Rate (cpm)	5 - 60	5 - 80
I. Time (sec)	0,3 - 2,5	0,3 - 2,5
I. Trig	OFF / AUTO / 1 - 5	OFF / AUTO / 1 - 5
E. Trig (%)	AUTO / 10 - 90	AUTO / 10 - 90
Pres. Ramp	1 - 5 (100 - 500 ms)	1 - 5 (100 - 500 ms)
I. Time Min (sec)	AUTO / 0,3 - 2,5	AUTO / 0,3 - 2,5
I. Time Max (sec)	AUTO / 0,3 - 2,5	AUTO / 0,3 - 2,5
C-Flow (L/min)	2 - 60	2 - 60

Cikkszámok

	Item numbers
EO-150 Ventilator	EO-150VNT EUR
Transport bag	EO-CARBAG1X0
Travel bag	EO-TRVELBAG1X0
Nomad bag	EO-NOMADBAG-EVO
Battery pack	EO-BATPCK
Battery Pack Coupling Cable	EO-CPLPACK
Battery bag	EO-BATBAG
Trolley	EO-TROLLEY



Forgalmazó: H.S.-MEDPLAN Kft.

1222 Budapest Nagytétényi út 30.
 Telefon: +36 1 3610136 / +36 1 3610272
 FAX: +36 1 3651186
 e-mail: medga@medplan.hu
 www.medplan.hu

Contact

Air Liquide Healthcare

6990 Creditview Road, Unit 6
 Mississauga, Ontario L5N 8R9
 www.airliquidehealthcare.ca

